

Namen uporabe

Calma™ se uporablja za hranjenje z materinim mlekom pri zdravih, donošenih otrocih. Medela ne priporoča uporabo Calme z adaptiranim mlekom.


Dojenje mora biti dobro vzpostavljeno pred uvedbo hranjenja s stekleničko.

Pomembne varnostne informacije

Preberite vsa navodila pred uporabo

SHRANITE TA NAVODILA ZA PRIHODNJO UPORABO

Izdelek

- Uporabite samo original Medela pribor.
- Calmo ne približujte radiatorju ali odprtemu ognju.
-  Ne izpostavljajte Calme direktnemu soncu, saj to lahko oslabi cucelj.
- Preglejte pred vsako uporabo: raztegnite prozoren silikonski cucelj v vse smeri in se prepričajte, da je nepoškodovan. Zavržite ga ob prvem znaku poškodbe ali obrabe.
- **Plastične stekleničke in sestavni deli postanejo krhki, ko jih zamrzemo in se ob padcu lahko zlomijo.**
- **Plastično stekleničko in sestavne dele lahko tudi poškodujemo, če z njimi nepravilno rokujemo (padec, premočno zapiranje, prevrnitev) .**
- **Ustrezno rokujte in skrbite za stekleničke in sestavne dele.**
- **Ne uporabljajte materinega mleka, če so stekleničke ali sestavni deli poškodovani.**

Uporaba

- Upoštevajte navodila za čiščenje.
- Ne uporabljajte Calme, ko ste utrujeni ali pretirano zaspani.
- To je izdelek za enega uporabnika. Če ga uporablja več kot ena oseba, lahko to predstavlja zdravstveno tveganje.

Za zdravje in varnost vašega otroka

OPOZORILO!

- **Vedno uporabljajte ta izdelek pod nadzorom odrasle osebe.**
- **Nikoli ne uporabljajte cuclja za hranjenje kot nadomestilo za tolažilno dudo.**
- **Neprekinjeno in daljše sesanje tekočin povzroči zobno gnilobo.**
- **Vedno preverite temperaturo mleka pred hranjenjem.**
- **Vse komponente, ki jih ne uporabljate, imejte izven dosega otrok.**
- **Zavržite ob prvih znakih poškodbe ali obrabe.**
- **Zaradi nevarnosti zadužitve ne podaljšujte vrvic ali zank.**
- **Nikoli ne pritrdite na vrvic, trakove, vezalke ali ohlapne dele oblačil. Otrok se lahko zadavi.**
- **Samo za uporabo z materinim mlekom. Ne uporabljajte adaptiranega mleka.**
- **Ne grejte mleka v mikrovalovni pečici, ker se zagreje neenakomerno in lahko opeče vašega otroka.**

Cucelj preverite pred vsako uporabo. Povlecite ga v vse smeri. Cucelj zavržite ob prvih znakih poškodb ali šibkosti. Pred vsako uporabo preglejte vse dele. Zamenjajte oz. zavržite dele ob prvih znakih poškodb ali iztrošenosti.



Vse dele obvezno očistite takoj po vsaki uporabi z milnico, da se izognete sušenju ostankov mleka in preprečite nastanek bakterij.

- Za čiščenje uporabljajte samo pitno vodo.
- Ne postavljajte delov neposredno v kuhinjsko korito za izpiranje in pranje. Za otroške predmete uporabite namenski umivalnik.
- Ne čistite Calme z ostrimi ali trdimi predmeti (kot je npr. ščetka, zobotrebec ali ostri nohti).
- Če perete Calmo v pomivalnem stroju, se lahko spremeni barva sestavnih delov. To nima nobenega vpliva na uporabnost.
- Da se izognete okužbi, se po čiščenju ne dotikajte notranjosti sestavnih delov.
- Shranjujte Calmo v zračno-prepustni, čisti vrečki/posodi ali v zračno-prepustnem, čistem papirju/krpi do naslednje uporabe.
- Iz higienskih razlogov priporočamo zamenjavo Calme po 3 mesecih.

Pred prvo uporabo

To je za zagotavljanje higiene.

- Calmo razstavite na posamezne dele.
- Operite vse dele s hladno vodo (približno 20°C/68°F), nato jih nežno očistite z veliko tople milnice (približno 30°C/86°F). Ponovno sperite s hladno vodo (približno 20°C/68°F) za 10-15 sekund.
- Vse dele prekrijte z vodo in pustite vreti 5 minut.
Alternativno lahko tudi uporabite Quick Clean™ vrečko za mikrovalovno pečico v skladu z navodili.
- Posušite vse dele s čisto krpo ali pa jih pustite, da se osušijo na čisti krpi.

Nasvet: Ko prekuhavate Calma sestavne dele, lahko v vodo dodate čajno žličko citronske kisline, da preprečite nastanek vodnega kamna. Upoštevajte, da lahko manjše sledi kisline še vedno ostanejo na Calma sestavnih delih. Uporabite vodo pitne kvalitete, da jih sperete.

Po vsaki uporabi

- Calmo razstavite na posamezne dele.
- Operite vse dele s hladno vodo (približno 20°C/68°F), nato jih nežno očistite z veliko tople milnice (približno 30°C/86°F). Ponovno sperite s hladno vodo (približno 20°C/68°F) za 10-15 sekund.
- Posušite vse dele s čisto krpo ali pa jih pustite, da se osušijo na čisti krpi.
- Kot alternativo prejšnjim korakom, lahko Calmo očistite v pomivalnem stroju. Če to storite, postavite dele v zgornji del ali pa v predel za jedilni pribor.

Enkrat dnevno

- Calmo razstavite na posamezne dele.
- Vse dele prekrijte z vodo in pustite vreti 5 minut.
Alternativno lahko tudi uporabite Quick Clean™ vrečko za mikrovalovno pečico v skladu z navodili.
- Posušite vse dele s čisto krpo ali pa jih pustite, da se osušijo na čisti krpi.



- Temeljito si operite roke (približno 1 minuto) z milom in vodo, preden se dotaknete Calme.
- Vsi sestavni deli morajo biti suhi pred uporabo.

Koraki izvedbe

- Izčrpajte in shranite materino mleko (glejte navodila za shranjevanje).
- Sestavite Calmo kot je opisano spodaj.
- Segrejte materino mleko v steklenički za mleko z večnamenskim zapiralom na vrhu. Mleko segrejte do največ 37°C/98.6°F.
- Namestite Calma™ cucelj na stekleničko tik pred hranjenjem.

Nasvet: Calma™ cucelj lahko uporabite v kombinaciji s katerokoli Medela stekleničko. Med transportom uporabite na steklenički za mleko Calma™ večnamensko zapiralo. Pri shranjevanju Calme, položite Calma™ večnamensko zapiralo na Calma™ osnovo.

Sestavljanje Calme

- Držite prozoren silikonski del. Dvignite spodnji rob navzgor (slika 1). Ne dotikajte se vrha zgornjega silikonskega dela.
- Pritisnite silikonski del (z obrnjenim robom) na štrleči del vrha sistema za nadzor pretoka mleka. Obrnite navzdol spodnji rob (sliki 2 in 3). Sedaj postavite sestavljen vrh (sistem za nadzor pretoka mleka) na osnovo (sistem za nadzor zraka) (slika 4).
- Preverite, če so vsi deli pravilno sestavljeni.
- Privijte Calma™ cucelj na stekleničko tik pred hranjenjem (5).

Razstavljanje

- Odvijte Calma™ cucelj iz stekleničke.
- Ločite vrh s silikonskim delom od osnove.
- Obrnite spodnji del silikonskega dela navzgor. Ločite silikonski del od vrha.
- Očistite Calmo, kot je predhodno opisano.

Shranjevanje in odtajevanje materinega mleka

Navodila za shranjevanje sveže izčrpanega materinega mleka (za zdrave, donošene otroke)	
Sobna temperatura 16 do 25°C (60 do 77°F)	najboljše do 4 ure
Hladilnik pri 4°C (39°F) ali nižje	najboljše do 3 dni
Zamrzovalnik -18 do -20°C (0 do 4°F)	najboljše do 6 mesecev
V hladilniku odtajeno materino mleko	Pri sobni temperaturi do 2 uri. V hladilniku: do največ 24 ur. Ne zamrzujte ponovno!

Za več informacij obiščite medela.com/storage

- Ne shranjujte mleka v vratih hladilnika. Namesto tega izberite najhladnejši del hladilnika (na zadnjem delu steklene police, nad predelom za zelenjavo).
- Izčrpano mleko lahko zmrznete v stekleničkah za mleko ali vrečkah za shranjevanje mleka. Stekleničk ali vrečk ne smete napolniti za več kot $\frac{3}{4}$, da pustite prostor za morebitno širjenje.
- Označite stekleničke ali vrečke z datumom izčrpanja.



Ne odtajajte zmrznjenega mleka ter ne segrevajte mleka v mikrovalovni pečici/posodi z vrelo vodo, da se izognete izgubi vitaminov, mineralov in drugih pomembnih sestavin ter da preprečite opekline.

- Z namenom ohranitve sestavin materinega mleka, odtajajte mleko v hladilniku čez noč. Alternativno držite stekleničko/vrečko za shranjevanje mleka pod toplo vodo (največ 37°C/98.6°F).
- Nežno vrtite stekleničko ali vrečko za shranjevanje mleka, da premešate maščobo, ki se je izločila. Izogibajte se tresenju in mešanju mleka.

Material: Steklenička, pokrov, večnamensko zapiralo: polipropilen. Cucelj: silikon. Osnova (sistem za nadzor zraka), vrh (sistem za nadzor pretoka mleka): polipropilen in termoplastični elastomer.

Narejeno brez BPA.



Ta simbol nakazuje, da pakiranje vsebuje izdelke namenjene stiku s hrano na podlagi standarda (EC) 1935/2004.

Odlaganje: Po lokalnih standardih.

Ustreza EN 14350.

Navodila za uporabo so dostopna tudi na spletu. Prosimo, glejte www.medela.com/calma.

Distributer:

AMS MEDING D.O.O., Trnovec pri Dramljah 54 a, 3222 Dramlje

Telefon: 03 746 11 56

Email: info@ams-meding.si



Medela Consumer AG
Althardstrasse 246
8105 Regensdorf
Switzerland
www.medela.com
© Medela AG

EU Representative:
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2
85386 Eching, Germany
www.medela.com/support

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com