

SL-NAVODILA ZA UPORABO

NAMENJENO ZA UPORABO PRI DOJEČIH MATERAH Z VNETIMI/RAZPOKANIMI/BOLEČIMI BRADAVICAMI

- Operite si roke pred uporabo izdelka.
- Pred odprtjem vizualno preglejte sterilno embalažo izdelka za znake poškodb. Izdelek s poškodovano embalažo se ne sme uporabiti.
- Odprite sterilni paket in vzemite hidrogel blazinico iz plastičnega ovoja.
- Izogibajte se dotikanju strani z gelom s prsti.
- Za izboljšanje pomirjajočega učinka, na hitro postavite stran blazinice na kateri je gel, pod hladen curek vode (1 do 2 sekundi), odstranite odvečno vodo in postavite na stran za 2 minuti. Ne spirajte več kot dvakrat na dan. Nežno položite stran blazinice, na kateri je gel, direktno na bradavico.
- Pred dojenjem odstranite blazinico s hidrogelom in jo položite na čisto površino, stran z gelom naj bo obrnjena navzgor. Nežno si umijte prsa s toplo vodo in jih posušite. Nato začnite z dojenjem.
- Po končanem dojenju blazinico ponovno namestite.
- Za bolj hladilen učinek lahko neodprte blazinice shranite v hladilnik za kratek čas, pred uporabo le-teh.
- Ne uporabljajte mila in detergentov za čiščenje blazinic.
- Blazinice hranite na hladnem in suhem mestu.
- Blazinico lahko uporabljate do 24 ur.
- Če blazinica z gelom postane umazana ali mlečna, jo prosim zavržite in uporabite novo.
- Odstranjevanje v skladu z lokalnimi predpisi.

POMEMBNI ZAŠČITNI UKREPI

- Uporabljajte v skladu z navodili.
- Hranite izven dosega otrok, še posebej plastičen ovoj.
- Posebna previdnost je potrebna, če se uporablja pri razpokanih bradavicah ali morebitni okužbi.
- Če prsne bradavice krvavijo ali pa je pekoč občutek, kontaktirajte zdravstvenega svetovalca.
- Da preprečite bolečino v prsnih bradavicah, je pomembno, da se otrok hrani na dojki v pravilnem položaju.
- Uporaba izdelka po priporočenem času lahko povzroči kontaminacijo.
- Zaradi ponovne obdelave in čiščenja lahko izdelek izgubi svojo funkcijo.
- Ne uporabljate v primeru znanih alergij na sestavine tega izdelka. Izdelek lahko vsebuje sledove znanih alergenov akrilamid in akrilonitril. Če imate znano alergijo na ti dve snovi, potem je priporočljivo, da hidrogel blazinic ne uporabljate.

KONTRAINDIKACIJE: Hidrogel blazinic ne uporabljajte pri večslojnih ranah, močno krvavečih ranah, globokih ranah zaradi opeklin ali pa kot oblogo za globoke rane.

SESTAVINE: voda, glicerol (Glycerol), polimer (Polymer)

Za pacienta/uporabnika/tretjo osebo v Evropski Uniji in v državah z enakim regulativnim režimom (Uredba EU 2017/745 o medicinskih pripomočkih), je pomembno, da v primeru uporabe tega izdelka ali kot posledica uporabe tega izdelka pride do resnega zapleta, obvesti o tem proizvajalca in/ali njegovega pooblaščenega predstavnika in nacionalni organ.

Prenašanje in shranjevanje v suhem prostoru pri sobni temperaturi.

Pomen simbolov



Označuje skladnost z zahtevami EU glede medicinskih pripomočkov



Ta simbol označuje, da se lahko predmet tehnično reciklira



Ta simbol označuje material iz katerega je predmet narejen