

Navodila za uporabo: **Steklenička SpecialNeeds™ Feeder**

## **SLOVENSKO**

Preberite vsa navodila pred uporabo.  
SHRANITE TA NAVODILA ZA UPORABO.

### **Predvideni namen**

SpecialNeeds Feeder je namenjen hranjenju dojenčkov z materinim mlekom in drugimi tekočinami podobne konsistence.

### **Namen uporabe**

SpecialNeeds Feeder je indiciran za uporabo pri dojenčkih:

- I s šibkim stanjem, kot je nizek mišični tonus;
- I z nevrološkimi, srčnimi ali dihalnimi motnjami, ki povzročajo težave pri usklajevanju sesanja, požiranja in dihanja;
- I z oralno-obraznimi anomalijami, kot je razcepljena ustnica/nebo ali močno priraščen jezik;
- I s Pierre Robinovim sindromom ali Downovim sindrom.

### **Pomembne varnostne informacije**

Za pacienta/uporabnika/tretjo osebo v Evropski uniji in državah z enakim regulativnim režimom (Uredba 2017/745/EU o medicinskih pripomočkih); če med uporabo tega pripomočka ali zaradi njegove uporabe pride do resnega zapleta, prosim obvestite proizvajalca in/ali njegovega pooblaščenega zastopnika in vaš nacionalni organ.

### **Za varnost in zdravje dojenčkov – OPOZORILO!**

- I Ta pripomoček uporabljate samo pod nadzorom odrasle osebe.
- I Ne segrevajte tekočine v mikrovalovni pečici, saj lahko to povzroči neenakomerno segrevanje in otroka opeče.
- I Pripomoček uporabljajte samo za predvideni namen, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- I Uporaba pri več kot enem dojenčku brez ustrezne ponovne obdelave lahko predstavlja tveganje za zdravje in povzroči navzkrižno kontaminacijo.
- I Uporabljajte samo originalne dele Medela.
- I Preglejte pripomoček pred vsako uporabo. Zavržite ga ob prvih znakih poškodb, plesni ali šibkosti.
- I Nikoli ne puščajte embalaže in komponent brez nadzora. Hranite jih zunaj dosega otrok.

### **Pomembni zaščitni ukrepi**

- I Stekleničke in sestavni deli postanejo krhki, ko zamrznejo, in se ob padcu lahko zlomijo.
- I Prav tako lahko stekleničke in sestavne dele poškodujemo, če z njimi nepravilno rokujemo, npr. padec, premočno zapiranje, prevrnitev.
- I Ustrezno rokujte in skrbite za stekleničke in sestavne dele.
- I Ne uporabljajte tekočin, če so stekleničke ali sestavni deli poškodovani.

### **Čiščenje**

#### **Pomembno**

- I Za čiščenje uporabljajte samo pitno vodo.
- I Razstavite vse dele pred prvo uporabo (glejte spodaj).
- I Očistite vse dele takoj po uporabi.

I Spodaj navedena navodila za čiščenje so splošna navodila. Za predpise in smernice, specifične za državo, se obrnite na vašega Medela posrednika ali obiščite našo spletno stran ([www.medela.com](http://www.medela.com)).

### **Pred prvo uporabo in enkrat na dan**

I Vse dele prekrijte z vodo in pustite vreti 5 minut.

I Pustite, da se posušijo na čisti krpi.

### **Po vsaki uporabi**

I Razstavite stekleničko na posamezne dele. Poskrbite, da boste rumeno ploščico ventila ločili od cuclja. Prav tako ločite belo membrano od ploščice ventila.

**Opomba:** Mleko, ki je ostalo v steklenički, lahko ponovno uporabite. Mleko, ki ostane v cuclju, pa morate zavreči. Zato stekleničko držite nad umivalnikom, nežno odvijte pokrov in ga odstranite skupaj s cucljem in ploščico ventila, da se mleko ne razlije. Zavržite ostanke mleka iz cuclja.

I Vse dele sperite s hladno vodo (približno 20 °C). Vse dele očistite z veliko tople milnice (približno 30 °C). Uporabite komercialno dostopno tekočino za ročno pomivanje posode, če je mogoče, brez umetnih dišav in barvil. Vse dele sperite s hladno vodo (približno 20 °C).

I Pripomoček lahko očistite tudi v pomivalnem stroju. Postavite dele v zgornji del pomivalnega stroja ali pa v del za jedilni pribor. Uporabite komercialno dostopen detergent za pomivalni stroj.

I Pustite, da se posušijo na čisti krpi.

### **Shranjevanje**

Čiste dele položite v čisto vrečko za shranjevanje ali v čist prostor. Pomembno je, da se vsa preostala vlaga posuši. Ne shranjujte delov v nepredušni posodi/vreči.

### **Uporaba**

I Priporočljivo je, da mati svoje prvo hranjenje s stekleničko SpecialNeeds Feeder izvaja pod nadzorom strokovnega/usposobljenega osebja.

I Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo tekočine.

### **Sestavljanje stekleničke**




- I Ploščico ventila držite tako, da je visok rob obrnjen navzgor. Vstavite belo membrano na ploščico ventila, znotraj roba. Pritisnite membrano tako, da je zatič v celoti v srednji odprtini ploščice ventila.
- I Napolnite stekleničko z zahtevano količino tekočine.
- I Sestavljen ventil z visokim robom, obrnjenim navzgor, postavite na odprtino stekleničke.
- I Cuelj namestite čez ploščico ventila, tako da je rob ploščice ventila znotraj cuclja.
- I Pokrov položite čez cuclj. Privijte vse dele skupaj s pokrovom.

### Polnjenje cuclja




- I Stekleničko držite pokonci. Iztisnite nekaj zraka iz cuclja.
- I Nadaljujte s stiskanjem, medtem ko stekleničko obračate navzdol.
- I Zdaj sprostitute cuclj. Vanj bo priteklo nekaj tekočine.
- I Ponavljajte prejšnje korake, dokler se cuclj ne napolni.

### Nadzor pretoka mleka

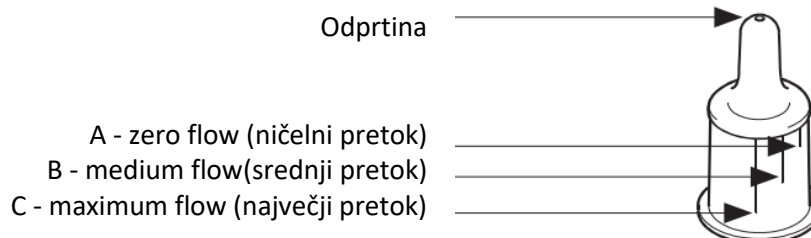

Steklenička SpecialNeeds Feeder ponuja možnost prilagoditve pretoka tekočine potrebam vašega dojenčka. Uporabite črte na cuclju, da nastavite pretok tekočine. Najkrajša črta ustreza ničelnemu pretoku, srednja črta srednjemu pretoku, najdaljša črta pa največjemu pretoku.


Za izbiro pretoka usmerite ustrezno črto na cuclju proti dojenčkovemu nosu (glejte sliko na desni). Izberite ničelni pretok (najkrajša črta), če se mora dojenček navaditi cuclja pred začetkom hranjenja.

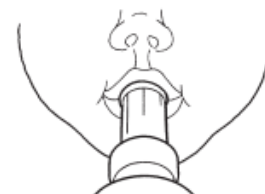

**POMEMBNO: Cuelj preverite pred vsako uporabo. Povlecite ga v vse smeri. Cuelj zavrzite ob prvih znakih poškodb ali šibkosti. Pred vsako uporabo preglejte vse dele. Zamenjajte oz. zavrzite dele ob prvih znakih poškodb ali iztrošenosti.**

## Kako deluje mehanizem za nadzor pretoka?

Položaj cuclja/črte v dojenčkovi ustih vpliva na odpiranje odprtine na vrhu cuclja:

<p><b>a</b> – ničelni pretok = odprtina je vodoravno Pritisk drži ventil zaprt.</p> <p><b>b</b> – srednji pretok = odprtina je diagonalno Ventil je delno odprt za zmeren pretok.</p> <p><b>c</b> – največji pretok = odprtina je navpično Pritisk odpre ventil za največji pretok.</p> <p><b>Opomba:</b> Odprtina se med sesanji zapre, tako da dojenčka ne zaliva. <b>Opomba:</b> Steklenička omogoča različen pretok. Da dosežete pretok tekočine med ničelnim in največjim pretokom, samo izberite ustrezen položaj med črtami na cuclju.</p>	
---	---

**Material:** cucelj in membrana: silikon, drugo: polipropilen.

**Odstranjevanje:** Skladno z lokalnimi predpisi.

Označuje skladnost z zahtevami EU za medicinske pripomočke.



Označuje, da embalaža vsebuje izdelke namenjene za stik z živili glede na Uredbo (ES) št. 1935/2004.



Označuje material, iz katerega je izdelek narejen.



Označuje število izdelkov, vključenih v paket.



Označuje, da je izdelek mogoče reciklirati.



**DISTRIBUTER:** AMS MEDING D.O.O., Trnovec pri Dramljah 54 a, 3222 Dramlje

**Telefon:** 03 746 11 50 **email:** [INFO@AMS-MEDING.SI](mailto:INFO@AMS-MEDING.SI)

**WWW.AMS-MEDING.SI**