

Navodila za uporabo

Rezervni cuclji

SL

Rezervni cuclji



Pred uporabo tega izdelka prosim preberite vsa navodila. Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.

Namen uporabe

V kombinaciji s stekleničko za materino mleko Medela je cuclj namenjen hranjenju z materinim mlekom in drugimi tekočinami podobne konsistence. Pred uvedbo hranjena s stekleničko, se prepričajte, da je dojenje dobro utečeno.



Pomembne varnostne informacije

- Neprekinjeno in dolgotrajno sesanje tekočin bo povzročilo zobno gnilobo.
 - Zobna gniloba se lahko pojavi pri majhnih otrocih tudi ob uživanju nesladkanih tekočin. To se lahko zgodi, če dojenčke dlje časa uporablja cuclj čez dan in zlasti ponoči, ko je pretok sline zmanjšan ali pa se cuclj uporablja kot tolažilna dudu.
- Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
- Cuclj preverite pred vsako uporabo in ga povlecite v vse smeri.
- Zavrzite ga ob prvih znakih poškodb ali šibkosti.
- Vse komponente, ki jih ne uporabljate, naj bodo izven dosega otrok.
- Nikoli ga ne pritrdite na vrvico, trakove, vezalke ali ohlapne dele oblačil. Otrok se lahko zadavi.
- Vedno uporabljajte ta izdelek pod nadzorom odraslih.
 - Nesreče so se zgodile, ko so dojenčki ostali sami z opremo za pitje zaradi padca ali pa je bil izdelek razstavljen.
- Nikoli ne uporabljajte cucljev kot tolažilno dudo.
- Zaradi nevarnosti zadušitve nikoli ne podaljšujte vrvic ali zank.
- Ne grejte mleka v mikrovalovni pečici, saj lahko to povzroči neenakomerno segrevanje in s tem opekline pri vašem otroku.
- Dotikajte se samo navoja z odprtino za stekleničko in ne cuclja, da se izognete kontaminaciji.
- Ne puščajte cuclja za hranjenje na direktni sončni svetlobi ali vročini.
- Uporabljajte samo original Medela rezervne dele, da zagotovite pravilnost delovanja.
- Drugi načini segrevanja, čiščenja, shranjevanja in uporabe drugih metod, ki se razlikujejo od priporočenih, niso sprejemljivi in lahko poškodujejo izdelek.

Čiščenje in higiena

- Za katerega koli od naslednjih opisanih postopkov čiščenja uporabite vodo pitne kakovosti.

- Takoj po uporabi očistite dele, da se izognete sušenju ostankov mleka in preprečite razvoj bakterij.
- Pri uporabi metlice pazite, da ne poškodujete delov.
- Pred vsako uporabo preglejte vse dele.
- Zamenjajte dele, če so poškodovani ali iztrošeni.
- Iz higienskih razlogov priporočamo zamenjavo cucljev po 3 mesecih.
- Opomba: Barvila za živila lahko razbarvajo komponente, kar pa ne vpliva na njihovo rabo.
- Upoštevajte ta navodila za čiščenje, razen če vam zdravstveni delavci svetujejo drugače.
- Ne puščajte cuclja za hranjenje na direktni sončni svetlobi, vročini, ne puščajte ga v razkužilu (raztopini za steriliziranje) dlje kot je priporočeno, saj to lahko oslabi cuclj.

Pred prvo uporabo in enkrat na dan

- Razstavite, umijte in sperite vse dele.
- Dele postavite v posodo zadostne kapacitete (velikosti).
- Napolnite s hladno vodo, dokler deli niso dobro prekriti. Po želji lahko dodate čajno žličko citronske kisline, da se izognete kopičenju vodnega kamna.
- Segrejte in pustite, da vre 5 minut.
- Odstranite iz štedilnika in odcedite vodo.
- Posušite dele s čisto krpo.

Kot alternativa vrenju:

Pomivalni stroj: dele postavite v zgornji predal

Mikrovalovna pečica: Uporabite Medela Quick Clean™ vrečke za sterilizacijo v mikrovalovni pečici ali drugo posodo, ki se lahko varno uporablja v mikrovalovni pečici.

Parni sterilizator: Sledite navodilom proizvajalca.

Po vsaki uporabi

- Razstavite in umijte vse dele, v topli, milni vodi.
- Sperite s čisto vodo. Posušite dele s čisto krpo.
- Po čiščenju, ko dele ne uporabljate, jih vstavite v čisto vrečko z zip zapiranjem ali pa jih shranite v posodi s pokrovom.
- Dele lahko alternativno tudi zavijete v čisto papirnato brisačo ali krpo.
- Ne postavite na neposredno sončno svetlobo.
- Izogibajte so dotikanju notranjosti steklenic in pokrovov.

Material - Silikon

Odstranjevanje – V skladu z lokalnimi predpisi

Skladno z EN 14350.



Embalaža vsebuje izdelke, ki so namenjeni za stik z živili v skladu z uredbo 1935/2004.



Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com

EU representative/EU predstavnik:

Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG, Georg-Kollmannsberger-Str. 2, 85386 Eching, Nemčija
(www.medela.com/support)

Distributer:

AMS MEDING D.O.O., Trnovec pri Dramljah 54 a, 3222 Dramlje

Telefon: 03 746 11 56

Email: info@ams-meding.si

www.ams-meding.si