

**Navodila za uporabo**  
**Oblikovalec bradavic****SLOVENSKO****Oblikovalec bradavic (Nipple Formers) – ident 008.0229**

Oblikovalec bradavic pripravi ploske ali udrte bradavice na dojenje. Ploske ali udrte bradavice lahko otežijo dojenje. Nekateri dojenčki imajo težave, da se pravilno prisesajo, kar lahko vodi do bolečih bradavic. Nežen pritisk na areolo s silikonsko membrano postopoma prisili bradavico, da izstopi. Terapija se lahko začne že med nosečnostjo (od približno 32. tedna naprej). Začnite nositi oblikovalec bradavic eno uro na dan, nato postopoma povečajte na približno 8 ur dnevno. Po porodu nosite oblikovalec bradavic med hranjenji (1/2 do 1 ure pred dojenjem). Izigibajte so nošnji ponoči, da preprečite preležanine.

Prezračevalne luknjice na vrhu školjke dovoljujejo zraku da kroži, s čimer preprečimo vlažnost in spodbujamo celjenje.

**Sestava in uporaba**

Preverite pred vsako uporabo. Zamenjajte izdelek ob prvih znakih poškodbe, plesni ali šibkosti. Položite silikonsko membrano na školjko. Prepričajte se, da je naokoli dobro pritrjena. Vstavite sestavljen oblikovalec bradavic pod nedrček tako, da je odprtina v silikonski membrani na sredini vaše bradavice. Prezračevalne luknjice na školjki morajo biti usmerjene navzgor. Priporočamo nošenje nedrčka za dojenje pri uporabi oblikovalca za bradavice; nedrčki za dojenje so prostornejši in oblikovalec se bo udobneje prilegal. Obrnite se na svetovalca za dojenje, da zagotovite ustrezen pritisk in hkrati ostane udobno.

**Opozorilo:** Ne hranite dojenčka z mlekom, ki se je nabralo v školjki. Zavržite to mleko.

**Navodila za čiščenje****Pred prvo uporabo in enkrat dnevno**

Položite ločene dele v majhno ponev, ki je napolnjena z mrzlo vodo. Priporoča se destilirana voda – če uporabite vodo iz pipe, lahko vodi dodate čajno žličko citronske kisline, da preprečite nabiranje vodnega kamna. Nato vodo zavrite in pustite, da vre približno 5 minut. Odljite vodo in položite dela na čisto krpo, da se osušita.

**Po vsaki uporabi**

Razstavite na dele. Školjke in membrane se morajo oprati z blagim čistilnim sredstvom, temeljito jih splahnite v mrzli vodi in osušite na čisti krpi.

**Opomba**

Školjke in membrane lahko pomivamo tudi v pomivalnem stroju ali pa jih damo v avtoklav.

**Material**

Školjka: Polipropilen / Silikonska membrana: Silikon

**Odstranjevanje**

V skladu z lokalnimi predpisi.

**Pomen simbolov**

Označuje skladnost z zahtevami EU za medicinske pripomočke



Označuje proizvajalca (ISO 15223-1, 5.1.1)



Označuje datum proizvodnje (ISO 15223-1, 5.1.3)



Identificira medicinski pripomoček



Označuje proizvajalčevo šifro serije ali lot (ISO 15223-1, 5.1.5)



Označuje številko izdelka proizvajalca (ISO 15223-1, 5.1.6)



Izdelek ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi (ISO 15223-1, 5.3.2)



Lomljivo (ISO 15223-1, 5.3.1)



Hranite na suhem (ISO 15223-1, 5.3.4)



Sledite navodilom za uporabo (ISO 15223-1, 5.4.3)



Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Švica

[www.medela.com](http://www.medela.com)

Predstavnik v EU:

Medela Medizintechnik GmbH & Co Handels KG

Georg-Kollmannsberger-Str.2, 85378 Eching, Nemčija

[www.medela.com/support](http://www.medela.com/support)

**DISTRIBUTER: AMS MEDING D.O.O., Trnovec pri Dramljah 54 a, 3222 Dramlje**

**Telefon: 03 746 11 56**

**Email: [info@ams-meding.si](mailto:info@ams-meding.si)**

**[www.ams-meding.si](http://www.ams-meding.si)**