

Navodila za uporabo Steklenička za materino mleko

SL

Steklenička za materino mleko

 **Pred uporabo tega izdelka prosim preberite vsa navodila. Shranite ta navodila za prihodnjo uporabo.**

Namen uporabe

Medela steklenička za materino mleko je namenjena hranjenju z materinim mlekom in drugimi tekočinami podobne konsistence. Pred uvedbo hranjena s stekleničko, se prepričajte, da je dojenje dobro utečeno.

Pomembne varnostne informacije

 **Za varnost vašega otroka in OPOZORILO!**

- Neprekinjeno in dolgotrajno sesanje tekočin bo povzročilo zobno gnilobo.
 - Zobna gniloba se lahko pojavi pri majhnih otrocih tudi ob uživanju nesladkanih tekočin. To se lahko zgodi, če dojenčke dlje časa uporablja cucelj čez dan in zlasti ponoči, ko je pretok sline zmanjšan ali pa se cucelj uporablja kot tolažilna duda.
- Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
- Cucelj preverite pred vsako uporabo in ga povlecite v vse smeri.
- Zavrzite ga ob prvih znakih poškodb ali šibkosti.
- Vse komponente, ki jih ne uporabljate, naj bodo izven dosega otrok.
- Nikoli ga ne pritrdite na vrvice, trakove, vezalke ali ohlapne dele oblačil. Otrok se lahko zadavi.
- Vedno uporabljajte ta izdelek pod nadzorom odraslih.
 - Nesreče so se zgodile, ko so dojenčki ostali sami z opremo za pitje zaradi padca ali pa je bil izdelek razstavljen.
- Nikoli ne uporabljajte cuceljev kot tolažilno dudo.
- Ne grejte mleka v mikrovalovni pečici, saj lahko to povzroči neenakomerno segrevanje in s tem opekline pri vašem otroku.
- Dotikajte se samo navoja z odprtino za stekleničko in ne cuclja, da se izognete kontaminaciji.
- Ne puščajte izdelka na direktni sončni svetlobi ali vročini.
- Uporabljajte samo original Medela rezervne dele, da zagotovite pravilnost delovanja.
- Drugi načini segrevanja, čiščenja, shranjevanja in uporabe drugih metod, ki se razlikujejo od priporočenih, niso sprejemljivi in lahko poškodujejo izdelek.

Čiščenje in higiena

- Spodnja navodila za čiščenje so splošna navodila. Za predpise in smernice za posamezno državo, povprašajte svojega Medela zastopnika ali obiščite našo spletno stran (www.medela.com).
 - Uporabite vodo pitne kakovosti za čiščenje in razkuževanje.
 - Pred prvo uporabo, očistite in razkužite vse dele (glejte poglavje A in B).
 - Po vsaki uporabi, očistite vse dele (glejte poglavje A).
 - Enkrat na dan, po uporabi, očistite in razkužite vse dele (glejte poglavje A in B).
- Čiščenje** – čiščenje površine delov s fizičnim odstranjevanjem ostankov mleka in drugih nečistoč.
- Razkuževanje** – učinkovito zmanjšanje števila mikrobov, ki so lahko prisotni na površinah opranih delov.

A. Čiščenje

- Razstavite stekleničko za mleko na posamezne dele
 1. Sperite posamezne dele s hladno vodo (cca. 20 °C).
 2. Umijte te dele z veliko tople, milne vode (cca. 30 °C). Uporabite komercialno dostopen detergent za pomivanje posode in čisto, mehko krtačo.
 3. Sperite dele s hladno vodo, približno 10 do 15 sekund (cca. 20 °C).
 4. Posušite dele kot je zapisano v poglavju C.

Kot alternativa ročnemu pranju:

V primeru grobe umazanije, sperite razstavljenе dele z obilico hladne vode.

1. Postavite dele v zgornji predal pomivalnega stroja.
2. Uporabite komercialno dostopen detergent za uporabo v pomivalnem stroju.
3. Sperite cucelj pod tekočo vodo, ko ga vzamete iz pomivalnega stroja.
4. Posušite dele kot je zapisano v poglavju C.

B. Razkuževanje

- Razstavite stekleničko za mleko na posamezne dele
 1. Dele postavite v posodo zadostne kapacitete.
 2. Na umite, razstavljenе dele, nalijte zadostno količino vode in pustite vreti 5 minut. (Poskrbite, da se deli ne dotikajo dna posode).
 3. Posušite dele kot je zapisano v poglavju C.

Kot alternativa vrenju:

1. Uporabite Medela Quick Clean™ vrečke v mikrovalovni pečici v skladu z navodili za uporabo teh vrečk.
2. Posušite dele kot je zapisano v poglavju C.

C. Sušenje

1. Dopustite, da se deli posušijo na zraku, na čisti kuhinjski krpi ali papirnati brisači.
2. Shranite čiste in suhe dele v čisto vrečko za shranjevanje ali v čist prostor. Ne shranjujte dele v nepredušni posodi/vrečki, če so vlažni. Zelo je pomembno, da se vsi ostanki vlage posušijo.

Shranjevanje in odtajevanje materinega mleka

Navodila za shranjevanje sveže izčrpanega materinega mleka (za zdrave, donošene otroke)

Sobna temperatura	Najbolje do 4 ure pri 16°C do 25°C (60 do 77 °F)
Hladilnik	Najbolje do 3 dni pri 4°C (39°F) ali nižje
Zamrzovalnik	Najbolje do 6 mesecev pri -18°C do -20°C (0 do 4°F)
Odmrznjeno materino mleko v hladilniku	Pri sobni temperaturi: do 2 uri V hladilniku: največ do 24 ur. Ne zamrznete ponovno!

Za več informacij obiščite medela.com/storage

- Ne shranjujte materinega mleka v vratih hladilnika. Namesto tega izberite najhladnejši del hladilnika (to je na zadnjem delu steklene police, nad predalom za zelenjavo).
- Izčrpano materino mleko lahko zamrznete v stekleničkah za mleko ali v vrečkah za shranjevanje mleka. Ne napolnite stekleničk in vrečk več kot 3/4, da pustite prostor za morebitne širitve.
- Označite stekleničke ali vrečke za shranjevanje mleka z datumom izčrpanja.



Previdnost

Ne odtajajte zamrznjenega materinega mleka in ne pogrevajte materinega mleka v mikrovalovni pečici ali posodi z vrelo vodo, da se izognete izgubi vitaminov, mineralov in ostalih pomembnih sestavin ter da preprečite opekline.

- Z namenom ohranitve sestavin materinega mleka, odtajajte mleko v hladilniku čez noč. Alternativno lahko držite stekleničko ali vrečko za shranjevanje mleka pod toplo vodo (največ 37°C).
- Nežno vrtite stekleničko ali vrečko za mleko, da premešate maščobo, ki se je izločila. Izogibajte se tresenju in mešanju mleka.
- Plastične stekleničke in sestavni deli postanejo krhki, ko jih zamrzemo in se ob padcu lahko zlomijo.
- Plastične stekleničke in sestavne dele lahko poškodujemo, če z njimi nepravilno rokujemo (padec, premočno zapiranje, prevrnitev).
- Ustrezno rokujte in skrbite za stekleničke in sestavne dele.

Material:

Steklenička, pokrov, navoj, zapiralo: Polipropilen (ne vsebuje Bisphenol-A, ne vsebuje DEHP ali lateksa).

Cucelj: Silikon

Odlaganje V skladu z lokalnimi predpisi

Ustreza standardu EN 14350.

SL Simboli na embalaži

Simbol označuje:

101045412/A 200.2200/2023-03/G



Material je del procesa za ponovno uporabo/recikliranje.



Kartonska embalaža



Izdelek ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi.



Izdelek naj bo na suhem.



Lomljivo-z izdelkom je potrebno previdno rokovati.



Omejitve vlažnosti pri delovanju, transportu in shranjevanju.



Omejitve atmosferskega tlaka pri delovanju, transportu in shranjevanju.



Dovoljene temperature pri delovanju, transportu in shranjevanju.



Sledite navodilom za uporabo.



Proizvajalec (Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Switzerland, www.medela.com)



Embalaža vsebuje izdelek, ki lahko pride v stik s hrano

EU pooblaščen predstavnik: Medela Medizintechnik GMBH & Co. Handels KG, Georg-Kollmannsberger-Str.2, 85386 Eching, Nemčija (www.medela.com/support)

Mednarodna prodaja: Medela AG, Lättichstrasse 4B, 6341 Baar, Švica (telefon: + 41 41 562 51 51; www.medela.com)

Distributer: AMS MEDING D.O.O., Trnovec pri Dramljah 54 A, 3222 DRAMLJE

Telefon: 03 746 11 50

Faks: 03 746 11 84

E-mail: info@ams-meding.si

www.ams-meding.si