

Navodila za uporabo: Medela vrečka za shranjevanje materinega mleka (IDENT 101046327)

25 vrečk (7 oz/210 ml) – brez BPA (brez bisfenol A)

Ta vrečka je namenjena za shranjevanje, transport in pogrevanje materinega mleka.

Koristni napotki

- 1) Preden se dotaknete vrečke za shranjevanje, si umijte roke z milom in vodo ter jih temeljito osušite. Odprite vrečko tako, da pretrgate po **puščici 1** v prikazani smeri. Vrečke ne napolnite čez oznako 210 ml, materino mleko se razširi, ko zamrzne.
- 2) Poskrbite, da bo območje zadrge čisto, odstranite zrak iz vrečke in jo popolnoma zaprite, da preprečite puščanje. Označite vrečko za shranjevanje materinega mleka, preden jo shranite.
- 3) Materino mleko ohladite v hladilniku ali zamrznite takoj po izčrpanju. Materino mleko lahko odtalite v hladilniku v približno 12-ih urah. Alternativno lahko vrečko z zamrznjenim mlekom držite pod toplo tekočo vodo (največ 37 °C ali 99 °F).
- 4) Ko je popolnoma odmrznjeno, lahko mleko segrejete tako, da vrečko (ali stekleničko) postavite za nekaj minut v skodelico, vrč ali skledo z mlačno vodo, da se segreje na telesno temperaturo (37 °C ali 99 °F). Stekleničko ali vrečko po segrevanju nežno zavrtite, brez stresanja ali mešanja, da premešate izločeno maščobo.
- 5) Če želite preliti materino mleko iz vrečke v stekleničko, pretrgajte po **puščici 2** v smeri, kot je prikazano in nalijte materino mleko v stekleničko.



Ne odmrzujte zamrznjenega materinega mleka v mikrovalovni pečici, prav tako ne pogrevajte mleka v mikrovalovni pečici ali ponvi z vrelo vodo, da preprečite opekline.



Embalaža vsebuje izdelke, ki so namenjeni za stik z živili v skladu z uredbo 1935/20024.



Izdelek je namenjen samo za enkratno uporabo.



Izdelek hranite stran od sončne svetlobe.

Odstranjevanje: V skladu z lokalnimi predpisi.



Medela Consumer AG, Lättichstrasse 4 b, 6340 Baar, Švica, www.medela.com

EU Responsible Person / Importer (EU odgovorna oseba / Uvoznik):

Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG, Georg-Kollmannsberger-Str.2, 85386 Eching, Nemčija

www.medela.com/support

Distributer: AMS MEDING D.O.O., Trnovec pri Dramljah 54 a, 3222 Dramlje

Telefon: 03 746 11 50

Email: info@ams-meding.si www.ams-meding.si