

SI Navodila za uporabo**Ident: 008.0240 - Nastavek za zbiranje mleka (Milk collection shells)**

Medela nastavki za zbiranje mleka zbirajo iztekajoče mleko in so udobni za nošenje. Koži prijazen, prožen material pomeni, da so udobni in diskretni za nošenje.

Uporaba

- med dojenjem, ko začne mleko teči iz druge dojke,
- ko iz dojke izteče preveč mleka.

Izogibajte so nošenju ponoči, da preprečite preležanine.

Sestava in uporaba

Na nastavek položite silikonsko membrano. Prepričajte se, da je naokoli dobro pritrjena. Sestavljen nastavke za zbiranje mleka postavite v neдрček tako, da je odprtina na silikonski membrani v sredini vaše bradavice. Priporočamo nošnje neдрčka za dojenje; neдрčki za dojenje so prostornejši in nastavek za zbiranje mleka manj pritiska na dojko. Izdelek morate uporabljati v pokončnem položaju in se prepričajte, da je odprtina za izlivanje obrnjena navzgor. Med nošenjem nastavka za zbiranje mleka se izogibajte nenadnim gibom. Pri odstranjevanju nastavka za zbiranje mleka se nekoliko nagnite naprej. Zbrano mleko lahko nato odlijete v drugo posodo.

Opozorilo: Samo mleko zbrano med dojenjem lahko shranite v sterilno posodo. Če dojenčka takoj ne nahranite z zbranim mlekom, morate posodo z mlekom takoj shraniti v hladilnik in ga uporabiti v roku 24 ur. Da vlaga ne bi poškodovala bradavic, priporočamo, da nastavke odstranite vsake 2 do 3 ure in pustite, da se dojke posušijo na zraku.

Navodila za čiščenje**Pred prvo uporabo in nato enkrat dnevno**

Ločene dele položite v manjši lonec, ki je napolnjen s hladno vodo. Priporočamo destilirano vodo – če uporabite vodo iz pipe, lahko dodate vodi malo citronske kisline, da preprečite nabiranje vodnega kamna. Pustite, da voda zavre in pustite vreti približno 5 minut. Odlijte vodo in vse dele temeljito sperite. Postavite dele na čisto krpo, da se posušijo.

Po vsaki uporabi

Razstavite izdelek na posamezne dele. Školjke in membrane morajo biti oprane z blagim čistilnim sredstvom, temeljito jih sperite v hladni vodi in pustite, da se posušijo na čisti krpi.

Opomba

Školjke in membrane lahko perete tudi v pomivalnem stroju ali avtoklavirate.

Material

Školjka: Polipropilen

Silikonska membrana: Silikon

Odstranjevanje

V skladu z lokalnimi predpisi.



Ta simbol pomenim, da embalaža vsebuje izdelke namenjene stiku s hrano glede na uredbo 1935/2004.

Medela oblikovalec za bradavice (Medela Nipple Formers) priporočamo za ploske ali vdrtne bradavice.

Boleče in razpokane bradavice lahko zaščitite pred nadaljnjim draženjem z uporabo Medela ščitnikom za dojko (Medela Breast Shells).

EU predstavnik: Medela Medizintechnik, Nemčija

Distributer: AMS MEDING D.O.O., Trnovec pri Dramljah 54a, 3222 Dramlje

Telefon: 03 746 11 50

Email: info@ams-meding.si

www.ams-meding.si

 Medela Consumer AG
Althardstrasse 246
CH-8105 Regensdorf,
Switzerland
www.medela.com
© Medela AG

International Sales
Medela AG
Lättichstrasse 4b
8340 Baar, Switzerland
Phone +41 41 562 51 51
www.medela.com

EU Representative:
Medela Medizintechnik
GmbH & Co. Handels KG
Georg-Kollmannsberger-Str. 2
85388 Eching, Germany
www.medela.com/support

Medela UK Ltd
Unit 3 Huntsman Drive
Northbank Industrial Park, Irlam
Manchester M44 5EG
United Kingdom
www.medela.com/support

Distributed by - Distribué par -
Distribuido por
Medela LLC
1101 Corporate Drive, McHenry,
IL 60050, USA
Phone (800) 435-8316 or
(815) 363-1166
customer.service@medela.com
www.medela.us

Medela Canada Inc.
4160 Sladeview Crescent, #8
Mississauga, ON, L5L 0A1, Canada
Phone (800) 435-8316
info@medela.ca
www.medela.ca

MCAE Ref. MCS IFU 190.0979/117400
- 12CDV1.0

